

機械器具 (24) 知覚検査又は運動機能検査用器具

一般医療機器 体表面筋電計電極 (11441001)

表面電極

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) を併用しないこと。
[相互作用の項参照]


【形状・構造及び原理等】

原材料


名称	原材料
電極	銀

形状

種類：表面筋電図用

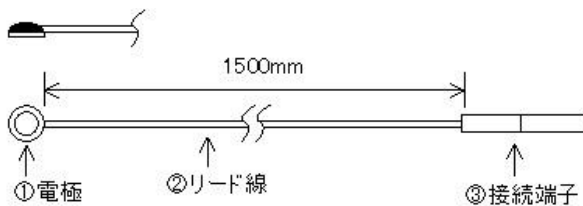

種類：前脛骨用

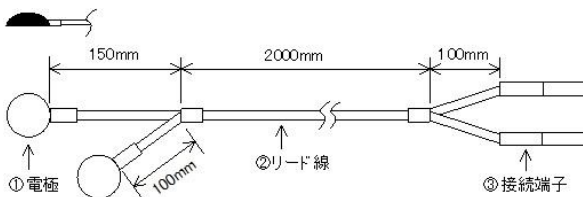

作動・動作原理

電極から導出された生体電気信号を筋電計等に伝達します。

【使用目的又は効果】

使用目的

体表面に設置し、筋肉または神経組織内の生体信号を検知する再使用可能な筋電図用電極です。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 装着部位を決定します。
- 2) インピーダンスを下げる為に、装着部位の皮膚を酒精綿等でよくこすります。
- 3) 電極の凹部をペーストで満たします。
- 4) 電極を装着部位に当て、粘着テープで固定します。
- 5) 接続端子を医用電子機器に接続します。
- 6) 医用電子機器を必要な感度に設定し、測定を開始します。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・傷および炎症のある部位に装着しないでください。

【使用上の注意】

相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	使用禁止	磁気による吸引力又は、誘導起電力が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

以下の条件を満たす場所で保管してください。

- ・高温多湿を避け、埃、塩分、イオンを含む空気にさらされない場所
- ・化学薬品の保管場所を避け、ガスの発生しない場所。

耐用限界について

以下のいずれかの事象が認められた場合、使用を中止してください。

- ・製品の変色や劣化・破損したとき。
- ・製品性能の維持が難しいとき。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

使用後に洗浄せずに放置するとペーストが固まり、電極性能が劣化しますので、使用後は速やかに洗浄してください。

- 1) 水又はぬるま湯で電極等に付着したペーストを洗い流します。
- 2) 水分をよく拭き取り、電極表面や接続端子を酒精綿で清掃した後、乾燥させてください。

2. 注意事項

- ・熱湯や塩素系漂白剤で清掃しないでください。
- ・エタノールによる浸漬洗浄しないでください。
- ・滅菌は行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ユニークメディカル

TEL：03-3480-7259